

Let's Go

TRUST
CARE

Vikingaplan 1, 21618 Malmö
040-15 61 20 www.trustcare.se

Let'sGo Indoor Walker.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Rollators für den Innenbereich. Er wird Ihnen den Alltag erleichtern, angenehmer und sicherer machen.

Um mit Ihrem Rollator vertraut zu werden, ist es wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung genau lesen und beachten.

Der Rollator unterstützt Sie und hilft Ihnen beim Gehen im Innenbereich. Sie können ihn als Ablage verwenden, wenn Sie auf einer Couch oder im Sessel sitzen, oder Sie nutzen ihn als einen kleinen Tisch, wenn Sie essen oder Ihren Kaffee trinken. Betätigen Sie in diesen Fällen die Parkbremse, wie es auf dem Bild rechts (Position 3) beschrieben ist, damit der Rollator sicher steht.

Wenn Sie Barrieren überqueren, achten Sie bitte auf einen festen Stand der Sachen, die Sie auf dem Tablett abgestellt oder abgelegt haben. **Vermeiden Sie heiße Flüssigkeiten in offenen Behältern.**

Das Tablett ist dafür gedacht, um nur leichte und kleine Gegenstände wie zum Beispiel einen Teller, eine Kaffeetasse, usw. darauf zu stellen. Transportieren Sie keine schweren Gegenstände.

Der Rollator ist **nicht** konstruiert, um darauf zu sitzen. Er ist nur dafür geeignet, das Tablett und den Stoffkorb zu tragen. Der Korb dient zum Transport von leichten Gegenständen wie Obst, Näh- bzw. Strickutensilien, eine Thermosflasche oder ähnliches.

Pflege: Reinigen Sie den Rollator und das Tablett mit einem weichen Tuch, Wasser und sanftem Reinigungsmittel.

Garantie:

Wir gewähren 2 Jahre Garantie. Korb, Seilzüge und Räder sind Verschleisssteile und von der Garantie ausgenommen.

Wie man den Rollator entfaltet.


(Siehe Bilder auf der Seite 2!)

1. Ziehen Sie die beiden schwenkbaren Räder des stehenden Rollators nach vorne

2. Schwenken Sie den Tablettrahmen nach hinten bis er einrastet


3. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungshaken eingerastet ist.

4. Lösen Sie die beiden Feststellschrauben an den Schiebegriffen, stellen Sie die für Sie optimale Höhe (bis max. STOP) ein und drehen Sie die Schrauben wieder fest.

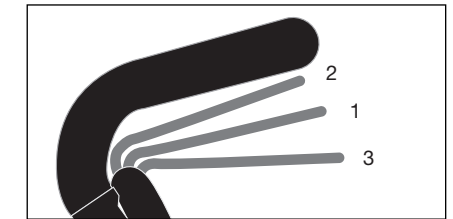

Funktionen der Bremse.

1. Position 1: Fahrbetrieb
2. Position 2: Bremsen
3. Position 3: Parkposition (Feststellbremse)

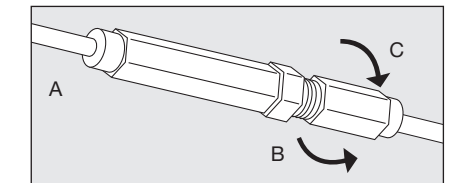


Einstellen der Bremse.

1. Die Bremswirkung wird durch die Einstellschraube am Seilzug A eingestellt.
- 2: Drehen Sie zum Verstärken der Bremswirkung die Schraube in Richtung C, zum Verringern in Richtung B.

Technische Daten:


Getestet nach ISO 11199-2 für ein max. Benutzergewicht von 100 kg.
 Max. Breite 55 cm.
 Gewicht 7 kg.
 Griff höhenverstellbar von 78 bis 90 cm.
 Tablettzuladung max 5 kg.
 Korbbeladung max 3 kg.

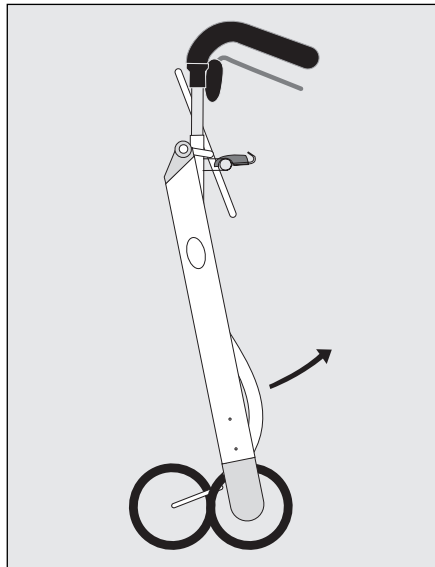


1.



2.

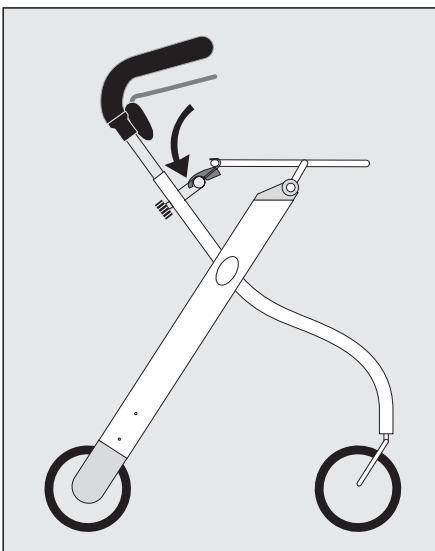

3.

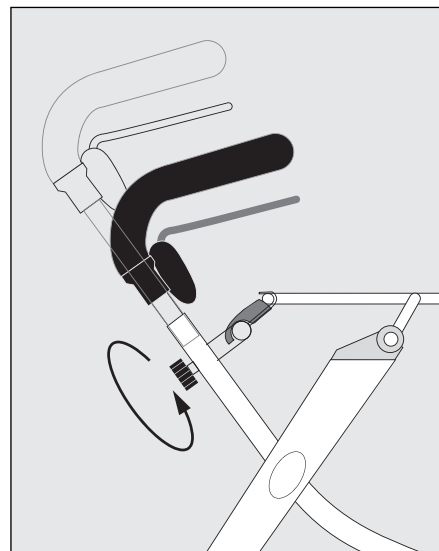

4.